

FICHE TECHNIQUE BUSTE DE PALPATION



Le **modèle de seins palpables**, représente le moulage original du buste féminin dont la taille des seins est de la taille moyenne.



Le buste

Ce modèle de buste à **l'aspect** particulièrement **réaliste** et reproduisant même les structures cutanées fines est en **silicone testée dermatologiquement**.

Méthode d'utilisation

La **mise en place** du modèle de seins palpables est très **simple** grâce à l'aide d'une **tiers personne**.

On **croise les sangles sur le dos**, on les fait passer dans les boucles blanches situées à la face inférieure du modèle et on les fixe au moyen des fermetures Velcro.

Après utilisation, le **modèle** doit être **conservé à plat** sur le socle.

ATTENTION

Ne pas aplatir, ne pas rouler ni plier le modèle. Évitez également de déchirer ou d'arracher brutalement les sangles de soutien.



ASTUCE

Des fiches d'auto-examen sont mises à disposition dans la valise, ainsi qu'une fiche détaillée d'utilisation du buste.



Hygiène et entretien

Éliminer les petites souillures en utilisant un savon doux. Ne pas utiliser de substances solvante, étant donné que celles-ci peuvent endommager le matériau.

La peau est plus douce lorsque le modèle est frictionné de temps en temps avec du talc.

